



AHD 1000

Alkoholowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i dezynfekcji skóry.

- szerokie spektrum biobójcze w 1 min.
- dodatek substancji nawilżających
- nie zawiera barwników i substancji alergizujących

**Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. II b, CE 0482
Produkt biobójczy – pozwolenie
nr 6987/17 (kat. I, gr. 1)**

Treści prezentowane
w niniejszym materiale
przeznaczone są wyłącznie
dla użytkowników profesjonalnych.

 **MEDILAB®**

medilab.pl

AHD 1000

Alkoholowy preparat w płynie
do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk i dezynfekcji skóry.



PODSTAWOWE CECHY

- preparat na bazie etanolu
- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójcze (EN 13727), prątkobójcze (EN 14348), grzybobójcze (EN 13624), wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro - EN 14476) potwierdzone badaniami
- czas dezynfekcji higienicznej określono wg metodyki EN 1500
- czas dezynfekcji chirurgicznej i działanie przedłużone (>3h) określono wg metodyki EN 12791
- dedykowany do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami oraz przed innymi zabiegami przebiegającymi z naruszeniem ciągłości tkanek
- dodatek pochodnych kwasu mlekowego i glicerolu chroni skórę przed wysuszeniem
- dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej
- preparat konfekcjonowany w systemie otwartym i zamkniętym – w hermetycznych, jednorazowych workach z unikalnym, zintegrowanym systemem dozowania, bez możliwości dolewania preparatu

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Preparat gotowy do użycia. Nie rozcieńczać!
- Płyn należy nanosić na suche, czyste i zdrowe ręce. Nie sputkiwać.
- **Higieniczna dezynfekcja rąk - zgodnie z techniką normy EN 1500:** odpowiednią dawkę preparatu AHD 1000 wcierać w skórę rąk przez 30 sek.
- **Chirurgiczna dezynfekcja rąk i przedramion - zgodnie z techniką normy EN 12791:** odpowiednią dawkę preparatu AHD 1000 wcierać w skórę rąk i przedramion przez co najmniej 1,5 min.
- **Dezynfekcja skóry przed zabiegami:** ubogiej w gruczoły łojowe – co najmniej 15 sek., bogatej w gruczoły łojowe – 1 min.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2306-02

SKŁAD CHEMICZNY

etanol – 79,9% (799 mg/g),
substancje nawilżające, zapachowe, woda

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:

bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze – 30 sek. oraz wirusobójcze (Polio – 1 min., Adeno, Noro – 30 sek.).
Dodatkowe działanie wobec wirusów: HIV, HBV, HCV (BVDV), SARS-CoV-2 (Vaccinia), HSV, A H1N1, Rota – 30 sek.

OPAKOWANIA

AHD 1000: butelka – 250 ml z atomizerem
AHD 1000: butelka – 500 ml
AHD 1000: worek – 700 ml
AHD 1000: butelka – 1 L
AHD 1000: kanister – 5 L

WYTWÓRCA:

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str 133
12247 Berlin • Niemcy
lysoform.de